


## 例：バイオフィックス iD/iDMS $\phi 4.0 \times 11.0\text{mm}$ の場合

骨質	マーキング ドリル	ツイスト ドリル (1.9mm)	パイロットドリル					コーティカル ドリル $\phi 4.0$ 用
			$\phi 3.0$ 用 (2.4mm)	$\phi 3.5$ 用 (2.7mm)	$\phi 4.0$ 用 (3.2mm)	$\phi 4.5$ 用 (3.7mm)	$\phi 4.5$ ハードボーン用 (4.3mm)	
最大回転数：分速800回転以下								
D1~D2	○	○	○	○	○	○		(○)※2
D3	○	○	○	○	○	(○)※2		
D4	○	○	○	○				

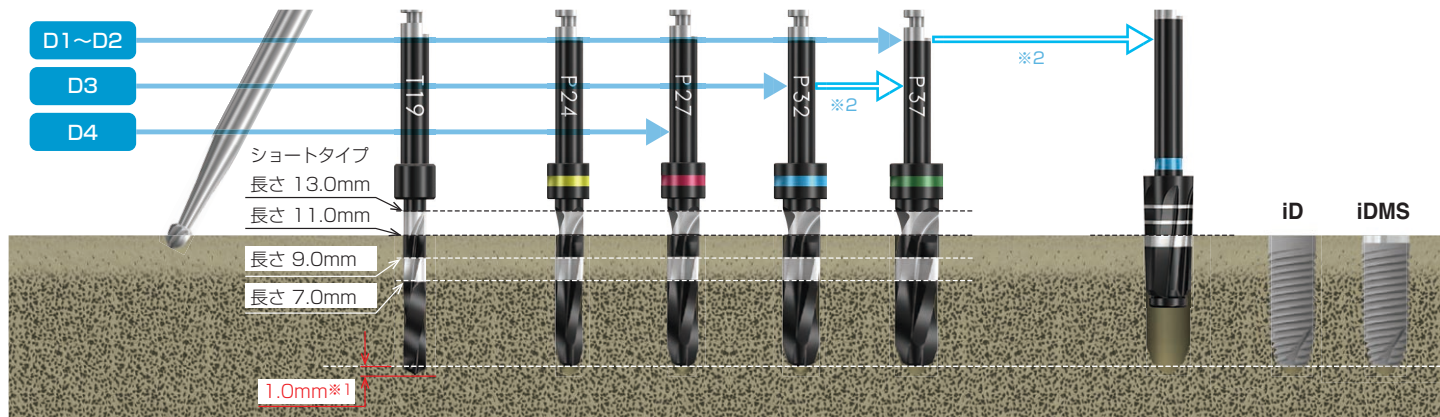

※1 ツイストドリルの形成窩はインプラントの長さよりも約1.0mm深くなります。又、ドリルストッパーを使用した場合はドリルストッパーが骨頂に当たるまでドリリングすると形成窩は更に1.0mm深くなります。

※2 骨質が固い場合は必要に応じて使用する。