

SCREW スクリューリムーバ Remover



アバットメントスクリュ破折時の取り出しに。

How to use


step 1

スクリューリムーバークローにマルチアダプターを装着します。




step 2

インプラント体にスクリューリムーバークローを挿入し、アバットメントガイドを挿入します。

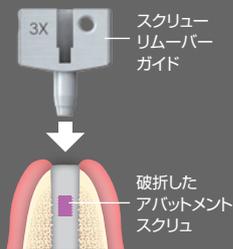

step 3


リムーバークローにリムーバークローを挿入し、反時計方向に回して、アバットメントスクリュ破折部を緩ませ、ピンセットなどで取り出します。

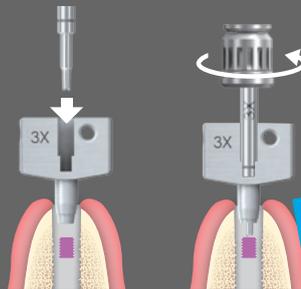

インプラント体内部のスレッドの清掃が必要な場合

アバットメントスクリュ破折部を取り出した後、スクリューリタップを挿入し、時計方向及び反時計方向に繰り返して回して、インプラント体内部のスレッドを清掃します。

スクリューリタップ

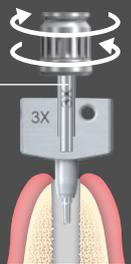

最重要ポイント
アバットメントスクリュの破折面に軽く接触させた状態(自重程度)で複数回 回してください。

One Point Advice

リムーバークローを手指で把持できない場合は、デブスゲージを右図のように使用し、把持します。



One Point Advice

アダプターリングを取り付けるとさらに操作しやすくなります。



バイオフィックス外科用コンポーネントII

スクリューリムーバ

標準医院価格 各サイズ 25,000円

[構成]

- ・スクリューリムーバークロー 1本
- ・スクリューリムーバークローガイド 1個
- ・スクリューリタップ 1本

[サイズ]

- ・3X (φ3.0インプラント用、φ3.5インプラント用)
- ・4X (φ4.0インプラント用、φ4.5インプラント用)



別売品


マルチアダプター

標準医院価格 12,500円



アダプターリング

標準医院価格 13,000円

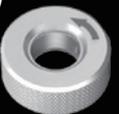

デブスゲージ

標準医院価格 13,000円



・販売名: バイオフィックス外科用コンポーネントII ・一般的名称: 歯科用インプラント手術器具 ・届出番号: 13B2X00094000188
※本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。※価格は2019年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。