



バイオフィックス 外科用コンポーネントII



トルクレンチ マルチアダプター アダプターリング

トルクレンチ

- 厚みを4.7mmに改良(旧品比:33%減)
- 方向ハンドルを反転させることで、ラチェットの正回転と逆回転の変更が可能になり、口腔内での操作性が向上します。

マルチアダプター

- 高さを8mmに改良(旧品比:33%減)
- トルクレンチと併用する際にラチェットの空転がよりスムーズになり、口腔内での操作性が向上します。

アダプターリング

- マルチアダプターの柄を拡張するリング(φ15.5×5.9mm)
- ラチェット機能も付いているので、併用することで口腔内での操作性が向上します。

製品・価格

BF外科用 COMPII トルクレンチ

商品コード : T051
価格 : ¥52,500



BF外科用 COMPII マルチアダプター

商品コード : T052
価格 : ¥12,500



BF外科用 COMPII アダプターリング

商品コード : T059
価格 : ¥13,000




バイオフィックス 外科用コンポーネントII アバットメントリムーバ II



アバットメントリムーバIIは、インプラントに強固に固着したアバットメントを取り外すレスキューツールです。



使用方法

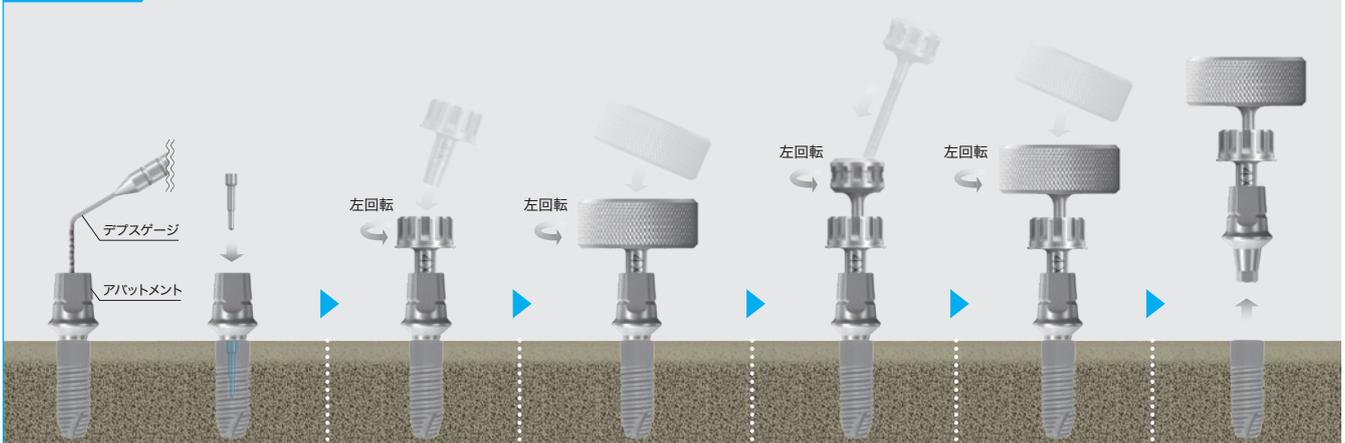

- ① アクセスホール底部からアバットメント辺縁^{※1}までの距離を読み取る。距離が4mm以上の場合はリムーバーピンを挿入する。
- ② リムーバーポイントを挿入し仮結する。
- ③ リムーバーポイントにアダプターリング(又はトルクレンチ)を装着し本締結^{※2}する。
- ④ リムーバースクリューとリムーバーポイントを螺合。手指で回転可能な範囲で回転。
①の距離
約4mm未満:Lサイズを使用
約4~7mm:Sサイズを使用
約7mm以上:Lサイズを使用
- ⑤ リムーバースクリューにアダプターリング(又はトルクレンチ)を装着し、許容最大トルク^{※3}を超えないように注意しながら、インプラント体からアバットメントが外れるまで機能させる。

※1 リムーバーポイントを上部構造に螺合する場合は、上部構造の辺縁までの距離を読み取る。その場合は上部構造の材質を考慮してチッピングに留意すること。
※2 推奨トルク：25~35N・cm

※3 許容最大トルク：3X…15N・cm / 4X…30N・cm
許容最大トルクを超えるとリムーバースクリューが破折するおそれがあります。

製品・価格

BF外科用 COMP II アバットメントリムーバII 3X用 / 4X用 セット

商品コード：T0583X / T0584X

価格：¥19,800

内容：①リムーバーピン
②リムーバーポイント 3.X用 / 4.X用
③リムーバースクリューL 3.X用(φ3.0 & φ3.5) / 4.X用



BF外科用 COMP II アバットメントリムーバII スクリュー 3XS / 4XS

商品コード：T058RS3XS / T058RS4XS

価格：¥9,800



販売名	一般的名称	届出番号
バイオフィックス 外科用コンポーネントII	歯科用インプラント手術器具	13B2X00094000188



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL.(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>



松風バイオフィックス株式会社

<http://www.shofubiofix.co.jp>

●本社:〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目16-2 松風 ESTビル

●西日本営業所:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11

TEL.(03)6880-2118 FAX.(03)6880-2488

TEL.(075)283-4180 FAX.(075)283-2418